

## Sterilisation der intra-operativen Ultraschall-Sonde VRP 08M

**Achtung:** Sterilisieren Sie die Sonden nicht in Dampf Autoklaven.  
Legen Sie die Sonden nicht in Desinfektions-Reiniger.

**Reinigung:** Keine automatischen Reinigungsverfahren anwenden.  
Legen Sie die Sonden nicht in medizinische Lösungen.  
Wischen Sie die Sonde mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab. (IPA - Isopropylalkohol oder Isopropanol)

**Sterilisation:** Wenden Sie eine Plasma-Sterilisation (Wasserstoffperoxid) unter 60 ° C. an.  
(auch EOG: Ethylenoxidgas unter 60 ° C.)  
Geben Sie keine Flüssigkeiten, Pulver oder Cellulose zum Sterilisationsgerät hinzu. Das reduziert die Effektivität der Sterilisation, weil die Substanzen Wasserstoffperoxid absorbieren. Vermeiden Sie ebenso unbedingt Wasser auf der Sensor-Oberfläche.  
Die Sterilisation sollte nur in Übereinstimmung mit den Vorgaben/Anleitungen des Herstellers der Sterilisations-Ausrüstung erfolgen.

Der Sonden-Hersteller empfiehlt, die Sonden nach 50-maliger Sterilisation nicht mehr einzusetzen.

Sollten sich für Sie möglicherweise weitere Fragen ergeben, bitten wir Sie um Ihre Nachricht.



VRP-08